

Brugermanual X30

Oplysninger:

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Låsenr.: _____

Købsdato: _____

Service:

Ved et service, på din adresse, gennemgår vores tekniker din elscooter for at sikre lang levetid.

Scooterpartner kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service, det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service eftersyn:

Motorophæng

Bagaksel

Elnet

Sædet

Styretøj

Dæktryk

Lysnettet

Motorbremse

Parkeringsbremse

Instrumentbordet

Affjedringen

Garanti/reklamationsret:

Din scooter leveres som udgangspunkt med 24 mdr. reklamationsret, gældende fra købsdato, med mindre andet er særskilt angivet.

Der kan ikke stilles krav om service for opretholdelse af dansk reklamationsret, men det anbefales for at sikre lang levetid på din elscooter.

Stempel og underskrift


Dato

Serviceskema:

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne beskrevet på forrige side gennemgås af en servicetekniker, hjemme på din private adresse.

Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

BEMÆRK: Scooterpartner tager forbehold for ændringer, forbedringer og andre tiltag, som gør at service intervaller, og andre procedure ændres.

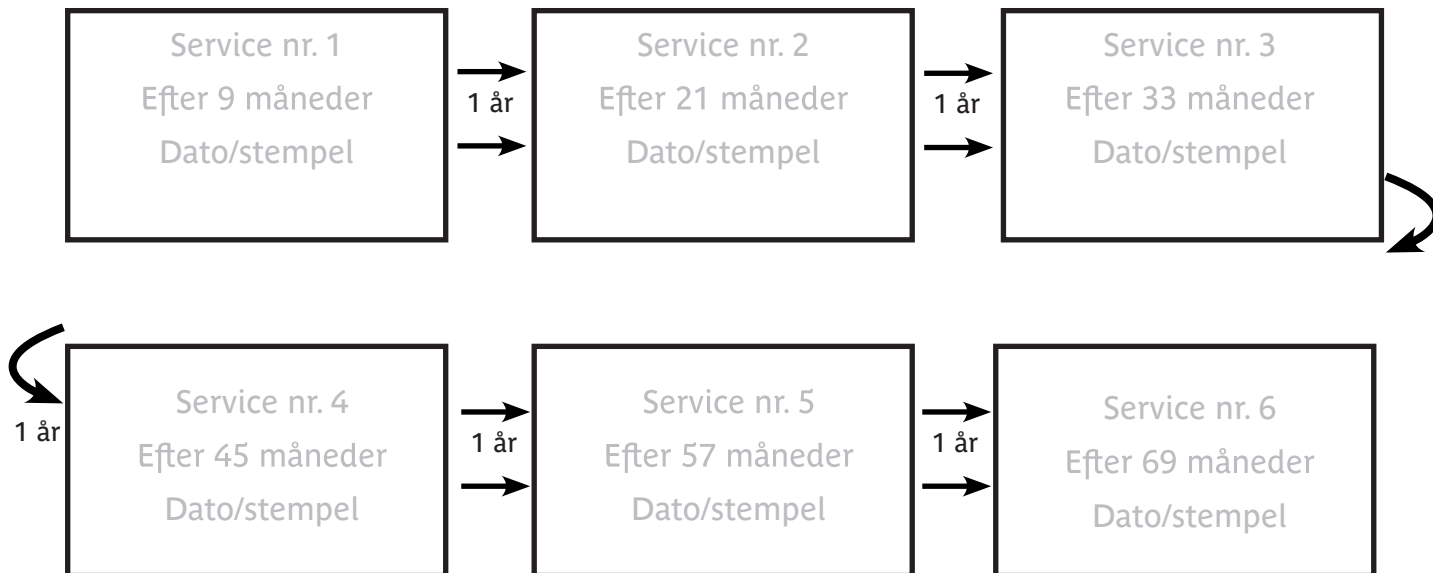

Sikkerhed/Forholdsregler

Denne manual skal læses igennem før køretøjet tages i brug. Manualen indeholder vigtige informationer omkring vedligeholdelse, opladning af køretøjet m.m.

Sikkerhedsinstruktioner:

Kør ikke køretøjet hvis du er påvirket af alkohol og andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.

Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farligere for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.

Kør altid køretøjet sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.

Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.

Hold altid begge hænder på styret under kørsel.

Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.

Det er påkrævet at bruge el-scooteren sikkerhedssele under kørsel

Må kun betjenes af personer født før 1995, eller personer født efter 1995, som har erhvervet et knallert kørekort

Batteri instruktioner og vedligeholdelse:

Læs opladnings instruktionerne på side 9 før køretøjet oplades.

Køretøjet bør sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis køretøjet ikke benyttes i længere tid, skal opladeren min. sættes til hver 14. dag.

Hvis scooters batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt.

Se yderligere information omkring opladning og batteri på side 9 og 1

Indholdsfortegnelse:

• <u>Introduktion</u>	<u>5</u>
• <u>Instrumentbord</u>	<u>5</u>
• <u>Display</u>	<u>6</u>
• <u>Display funktioner:</u>	<u>7</u>
• <u>Sædetype:</u>	<u>8</u>
• <u>Opladning</u>	<u>9</u>
• <u>Kørsel</u>	<u>9</u>
• <u>Tændingslås og ratlås</u>	<u>10</u>
• <u>Vedligehold</u>	<u>10</u>
• <u>Service og garanti</u>	<u>11</u>
• <u>Batteri informationer</u>	<u>11</u>
• <u>Parkeringslås</u>	<u>12</u>
• <u>Specifikationer</u>	<u>12</u>

Introduktion:


De ønskes tillykke med din nye X30 el-scooter fra Harald Nyborg.

Vi siger tak fordi du valgte en scooter fra os. Vi håber din nye el-scooter lever op til dine forventninger og vil give dig den frihed som produktet er designet til at give.

Ved spørgsmål angående din scooter, er du til hver en tid velkommen til at kontakte os for afklaring.

Instrumentbord:

Scooteren har instrumentbord som herunder:

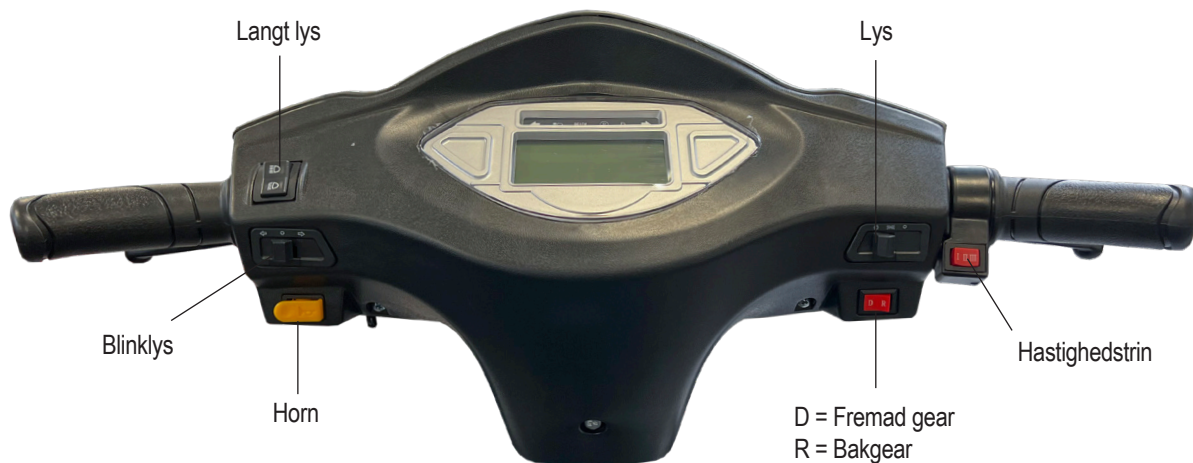

Display:



Display funktioner:

1: Blinklys

Dette er blinklys indikatoren, denne vil lyse når blinklyset er aktiveret.

2: Langt lys

Dette er langt lysindikatoren, denne vil lyse når det lange lys er aktiveret.

3: Klar indikator

Dette er klar indikatoren, denne vil lyse når el-scooteren er klar til at køre.

4: Bakgear

Dette er bakgear indikatoren, denne vil lyse når el-scooteren er i bakgear.

5: Fremad gear

Dette er fremad gear indikatoren, denne vil lyse når el-scooteren er i bakgear.

6: Volt viser

Her kan du se en aktuelle spænding på batterierne.

7: Hastighed

Viser sin aktuelle hastighed i km/t.

8: Batteri

Viser dit aktuelle batteri niveau. 10 streger, så er dit batteri fuldt opladt. Strengerne vil langsomt forsvinde en efter en, når du bruger strømmen.

9: ODO

Viser hvor langt el-scooteren har kørt i alt.

Sædetype:

Sæde funktioner:

Armlæn.

Armlænet kan løftes op langs
ryglænet, for nemmere udstign

Juster sæde frem/tilbage.

Træk op i håndtaget og skub
sædet frem eller tilbage.



Opladning:

For at genoplade scooterens batteri skal du benytte den medfølgende batterioplader, som du modtager ved levering. Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden ende i en almindelig stikkontakt. Forbind opladerens anden stik til scooterens ladestik. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i. Tryk på "I" på opladerens tænd/slukknop. Opladningen er nu i gang. Du vil se opladerens lysdioder blive henholdsvis Rød og Gul. Når opladningen er fuldstændt vil den gule lysdiode skifte til grøn.



Vi anbefaler at sætte scooteren til opladning efter hver køretur. Opladeren stopper selv, når batteriet er fuldt opladt. Skal scooteren ikke benyttes i længere tid, eller opmagasineres, skal der stadig tilsluttes oplader hver 14. dag, således batteriet ikke tager skade.

Vi anbefaler at lader tilsluttes efter endt kørsel hver gang.

Under opladning skal du blot slukke for din scooter. Scooterens batteriindikator vil ikke informere dig om ladestatus under opladning, men kun under kørsel.

Kørsel

Det er vigtigt at lære scooteren godt at kende inden du bevæger dig ud i trafikken. Start med lav hastighed indtil du føler dig tryk med scooterens funktioner. Bemærk – hvis du stille og roligt giver gas på gashåndtaget, vil du opnå en mere jævn kørsel. Husk at når du slipper gashåndtaget, bremses el-scooteren ikke før du trykker håndbremsen ind.

Undgå at lave skarpe sving ved høj hastighed. Ved op og ned kørsel af f.eks. fortov bør du altid køre lige på op/nedkørslen.

Din el-scooter anses som værende en lille knallert i færdselsloven. Du skal derfor agere som lille knallert i trafikken. Forefindes der en cykelsti skal denne benyttes, hvis ikke skal du køre i vejsiden.

Du må ikke køre i gågader og butikker.

Når du skal dreje, anbefaler vi at man giver tegn med hånden. Dette ses bedre af andre trafikanter end scooterens blinklys.

Tændingslås og ratlås:

Tænd scooteren:


Sæt nøglen i tændingslåsen og drej nøglen med uret.
Derefter vil scooteren være tændt

Sluk scooteren:

Drej nøglen mod uret og tag nøglen ud af tændingslåsen.
Derefter vil scooteren Slukket

Ratlås:

Drej styret helt med venstre, derfor kan du trykke ind på nøglen og dreje nøglen mod uret.
Så er ratlåsen aktiveret. For at låse op igen, skal du blot dreje nøglen med uret.

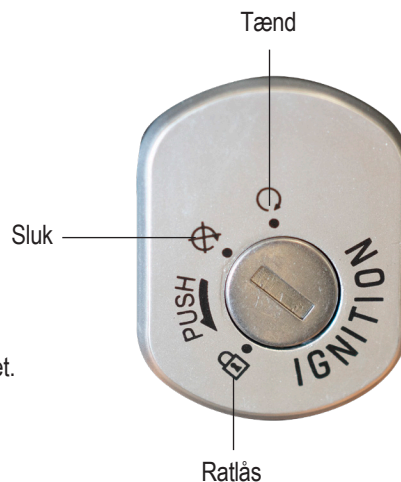

Vedligehold:

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din scooter er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Dagligt:

Forsikre dig at bremserne virker optimalt.
Forsikre dig at scooteren er ladet helt op.

Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca 2,5 – 3 bar.
Rengør sæde og plastikskjold med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på scooteren.

Årligt:

Det anbefales at få serviceret din scooter hver 12. måned.

Service og garanti:

Din nye scooter leveres med reklamationsret efter dansk købelov. Reklamationsretten gælder i 24 måneder og dække fejl scooteren har været behæftet med ved leveringen. Reklamationsretten dækker ikke sliddele så som dæk, pære, bremses, batterier og andre dele som er udsat for konstant slid. Reklamationsretten bortfalder ved brug af uoriginale dele, samt defekter grundet uagtsomhed eller manglende vedligehold.

Ved en evt. reklamation skal der rettes henvendelse til leverandøren som har leveret produktet, hvor problemet forklares og en tekniker bestilles. Teknikeren kommer herefter ud til din adresse for at udbedre problemet. Hvis du mod vores forventning skulle komme i en situation hvor scooteren ikke kan transporteres hjem til din adresse anbefaler vi at du bruger fx Falck. En mulighed kan være at tegne et Falck abonnement som ekstra sikkerhed.

Batteri informationer:

Din scooter er forsynet med 5 stk. 12V vedligeholdesfrie batterier.

Når batteriet er slidt og skal udskiftes, er det vigtigt at få de rigtige batterier i igen. Kontakt da forhandleren hvor du købte produktet for mere information.

Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag du starter med at køre på din scooter. Stille og roligt vil batteriet slides og din maksimale distance vil blive kortere og kortere, indtil du til sidst må udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor meget scooteren bliver brugt og hvordan. Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter type af brug. Undgå at aflade dit batteri helt. Dette nedsætter batteriets levetid kraftigt. Oplad altid din scooter efter hver tur. Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant fart vil du opnå scooterens maks. rækkevidde som du kan læse i scooterens specifikationer. Kører du derimod i byen med megen start og stop, vil scooteren bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive nedsat. Megen start og stop, som f.eks. ved hundeluftning vil nedsætte rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Andre faktorer som spiller ind er kulde, som påvirker batteriets kapacitet. Et temperaturfald fra 20 grader til 7 grader vil ca. halvere batteriets kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, grus o.lign. vil kræve mere strøm og dermed nedsættes scooterens rækkevidde.

Parkeringslås:

Parkering af din el-scooter:

Når du parkerer din el-scooter, er det vigtigt at du husker at låse håndbremsen, for at forhindre at el-scooteren skulle trille væk.

For at låse håndbremsen skal du først trykke håndbremsen ind. Samtidig med du holder håndbremsen ind, skal du trykke op på „Håndbremse låsen“. Derefter skal du blot slippe håndbremsen og efterfølgende slippe „Håndbremse låsen“.

For at løsne håndbremse låsen igen, skal du blot trykke ind på håndbremsen og bremsen vil selv løsne sig.



Specifikationer:

Vægt:	120 kg
Max hastighed:	25 km/t
Hastighedsregulering:	Ja
Rækkevidde:	Op til 45 km
Max brugervægt:	120 kg
Indstigningshøjde:	15 CM
Motoreffekt:	1000W
Opladningstid:	7 Timer

Oplader:	Ja
Batteri:	5 x 12V 20 Ah
Hjulstørrelse:	10"
Venderadius:	1,65 Meter
Bremselængde:	2 Meter
Sidespejle:	Ja
Dimensioner (LxHxB):	155cm x 119cm x 69cm
Sædejustering:	Ja



Scooterpartner

+45 63 40 20 30

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til produktet og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet.
Der tages forbehold for trykfejl.

